



uniwersalne zamienniki wkładów

Instrukcja obsługi

GYMFORM SIX PACK

Uniwersalne zamienniki wkładów

8 samoprzylepnych poduszek

Życie wkładów jest różne i zależne od rodzaju skóry, jej przygotowania, typu stymulacji, przechowywania i klimatu. Po około 30 sesjach jest zalecane aby wymienić wkłady aby osiągać maksymalne rezultaty. Jeśli stwierdzisz, że wkłady stają się przedwcześnie nieefektywne, zwilż je wilgotną szmatką.

Międzynarodowe patenty w opracowaniu.

Wszelkie imitacje będą przedmiotem pozwów sądowych. GYMFORM® SIX PACK jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Unii Europejskiej.

8 samoprzylepnych poduszek

Pomimo iż zostały specjalnie zaprojektowane dla GYMFORM SIX PACK, mogą być używane z innymi typami urządzeń do elektrycznej stymulacji mięśni.

Wskazówki dotyczące użytkowania:

- 1- Umyj i wysusz rejon skóry, na którym zamierzasz umieścić wkład.
- 2- Usuń ochronne plastikowe osłonki z samoprzylepnej poduszki.
- 3- Umieść 6 samoprzylepnych poduszek na silikonowej jednostce GYMFORM SIX PACK. Każda poduszka powinna być umieszczona bezpośrednio nad zakrzywioną szarą linią.
- 4- Zdejmij wszystkie plastikowe osłony z drugiej strony samoprzylepnych poduszek i zamocuj jednostkę silikonową Gymform® SIX PACK (2) w rejonie mięśni brzucha (na brzuchu).
ZAUWAŻ: Powtórz procedurę z jednostką silikonową z dwoma poduszkami poprzez umieszczenie 2 dużych poduszek bezpośrednio nad szarą zakrzywioną linią. Następnie zdejmij plastikową osłonkę i przyczep poduszkę do wybranej grupy mięśni.
- 5- Zawsze wyłączaj urządzenie do elektrycznej stymulacji mięśni przed zdjęciem poduszek.
- 6- Umieść ponownie ochronne plastikowe osłonki na Gymform® SIX PACK. Takie działanie znacznie wydłuży życie poduszek.

Ostrzeżenie:

NIE STOSUJ przyklepanych wkładów na podrażnioną skórę. Jeśli pojawi się wysypka zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem. Zawsze czytaj instrukcję użytkowania zanim użyjesz urządzenia do elektrycznej stymulacji mięśni.



www.tvokazje.pl